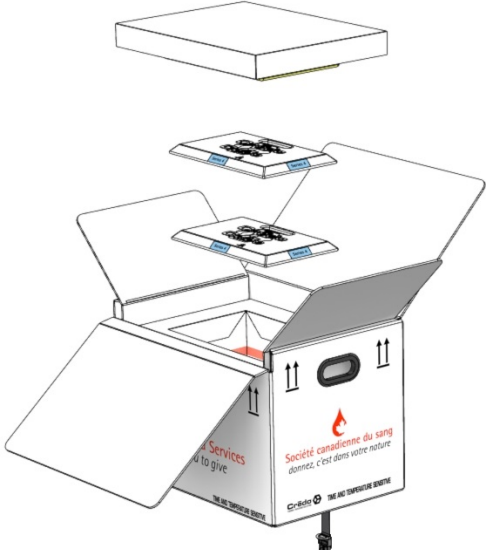



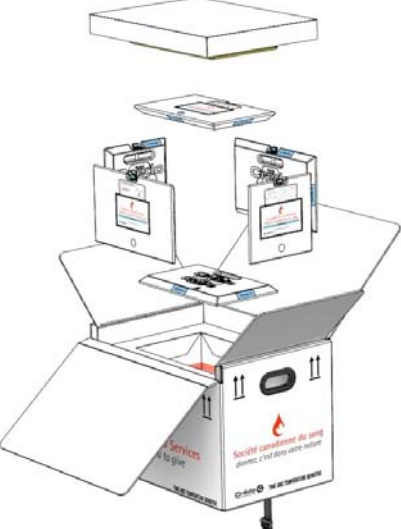
Pièce jointe n° 1 :

Configurations d'emballage pour les conteneurs d'expédition isothermes

Concentrés de globules rouges (CGR) — courts trajets (8 litres)


	<p>Éléments à vérifier à la réception :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Conteneur : conteneur de 8 litres à isolation en polyuréthane, fermé hermétiquement ➔ Position des 2 plaques eutectiques de type 4 : 1 sur les CGR et 1 en dessous ➔ Emplacement des CGR : sous la ligne rouge à l'intérieur du conteneur ➔ Délai de livraison (temps entre l'heure d'emballage et l'heure de réception) : ≤ 17 heures <p><i>Pour l'heure d'emballage, voir le bordereau d'expédition (packing slip).</i></p> <div data-bbox="743 892 1416 1260" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Packing Slip NUMBER 000000000109  Date and Time Prepared : 03/07/2013 - 10:13 Purchase Order # : SIDE CAMPUS (0000550125)</p> <p>Order Number : 0000000000032 Ordered Qty : 2 Agreed Quantity : 2</p> </div>
--	--

Concentrés de globules rouges (CGR) — longs trajets (8 litres)

	<p>Éléments à vérifier à la réception :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Conteneur : conteneur de 8 litres à isolation en polyuréthane, fermé hermétiquement ➔ Position des 6 plaques eutectiques de type 4 : en cube ➔ Emplacement des CGR : à l'intérieur du cube ➔ Délai de livraison (temps entre l'heure d'emballage et l'heure de réception) : ≤ 24 heures <p>Remarque : Cette configuration est aussi utilisée pour les CGR lavés et déglycérolés.</p>
---	---



Plaquettes

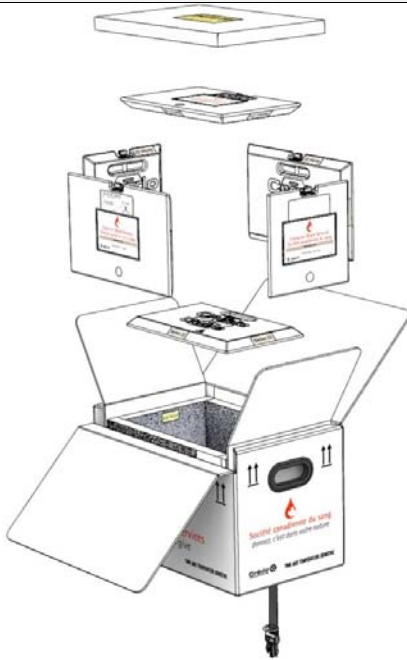

Éléments à vérifier à la réception :

- Conteneur : conteneur de 8 litres à isolation sous vide, avec panneaux isolants intacts (voir exemples ci-dessous)
- Position des 6 plaques eutectiques de type 22 : en cube
- Emplacement des plaquettes : à l'intérieur du cube
- Délai de livraison (temps entre l'heure d'emballage et l'heure de réception) : ≤ 24 heures

Panneaux conformes



- Les panneaux d'isolation sont rigides et leur enveloppe est bien étirée.


Panneaux non conformes



- Le panneau arrière manque de rigidité et son enveloppe est gondolée, ce qui signifie qu'il a perdu sa capacité d'isolation.



Produits congelés (8 litres)

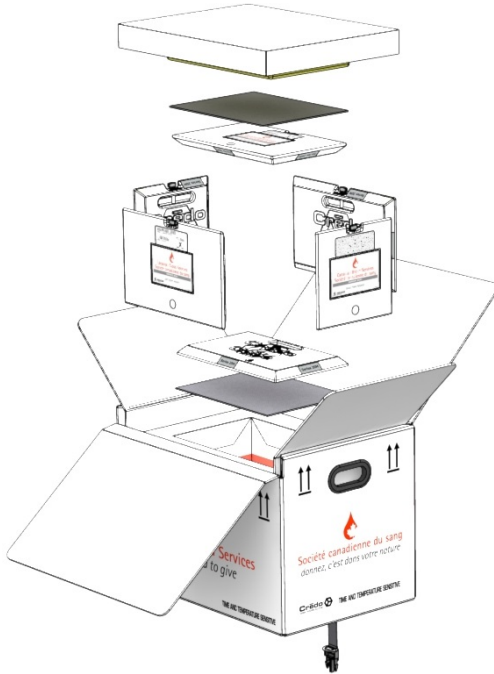


Éléments à vérifier à la réception :

- Conteneur : conteneur de 8 litres à isolation en polyuréthane, fermé hermétiquement
- Position des 6 plaques eutectiques de type 20M : en cube
- Délai de livraison (temps entre l'heure d'emballage et l'heure de réception) : ≤ 24 heures

Remarque : À la réception, les plaques eutectiques seront à une température égale ou inférieure à -20°C . Il est conseillé de porter des gants pour les manipuler.

Produits congelés (conteneur en polystyrène expansé)

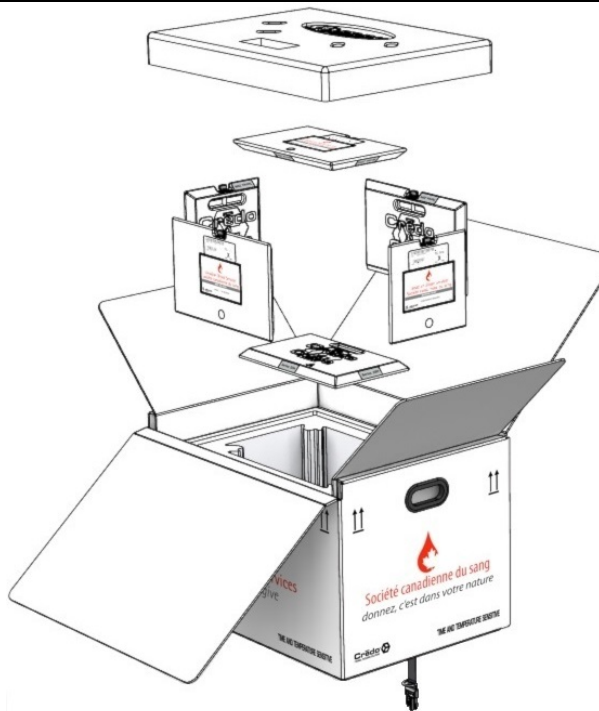


Éléments à vérifier à la réception :

- Conteneur : conteneur en polystyrène expansé
- Position des 6 plaques eutectiques de type 20M : en cube, la plaque du haut reposant directement sur les produits. Si nécessaire, de l'emballage sera placé au-dessus de la plaque du haut.
- Délai de livraison (temps entre l'heure d'emballage et l'heure de réception) : ≤ 24 heures

Remarque : À la réception, les plaques eutectiques seront à une température égale ou inférieure à -20°C . Il est conseillé de porter des gants pour les manipuler.



Protéines plasmatiques à température ambiante (16 litres)

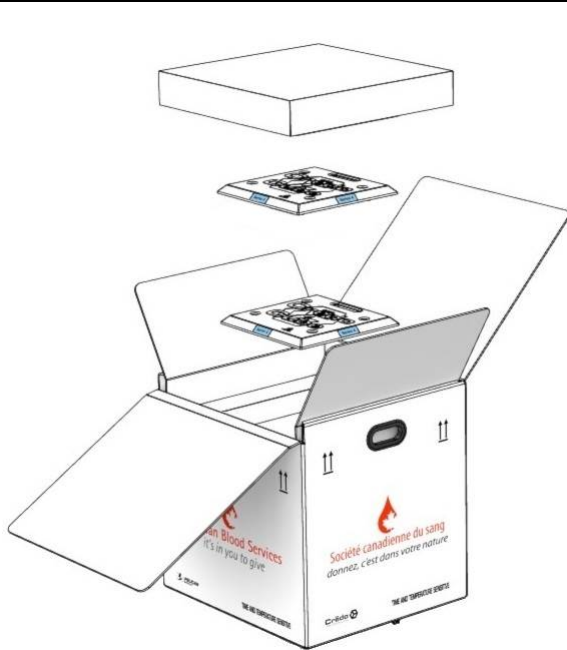


Éléments à vérifier à la réception :

- Conteneur : conteneur de 16 litres à isolation en polyuréthane, fermé hermétiquement
- Position des 2 plaques eutectiques carrées de type 4 : 1 sur les produits et 1 en dessous
- Délai de livraison (temps entre l'heure d'emballage et l'heure de réception) : ≤ 24 heures

Remarque : Les protéines plasmatiques conservées à température ambiante peuvent être expédiées dans leurs boîtes d'origine si le transport se fait dans des conditions de température appropriées dans des véhicules de la Société canadienne du sang.

Protéines plasmatiques à température ambiante (8 litres)

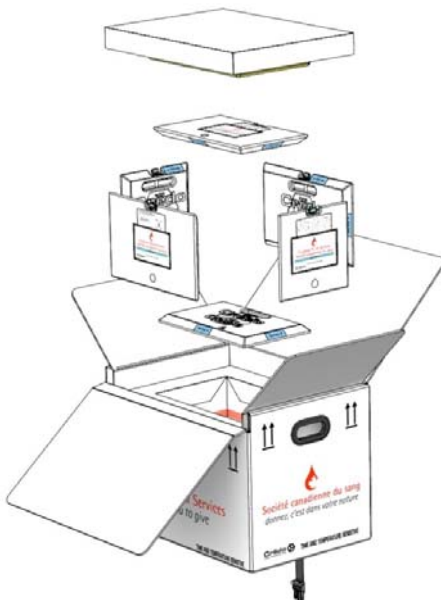


Éléments à vérifier à la réception :

- Conteneur : conteneur de 8 litres à isolation en polyuréthane, fermé hermétiquement
- Position des 6 plaques eutectiques de type 4 : en cube
- Emplacement des protéines plasmatiques : à l'intérieur du cube
- Délai de livraison (temps entre l'heure d'emballage et l'heure de réception) : ≤ 24 heures



Protéines plasmatiques réfrigérées (16 litres)

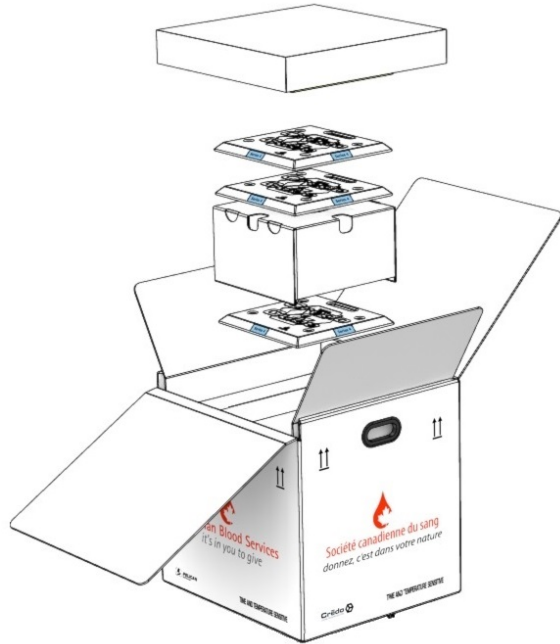


Éléments à vérifier à la réception :

- Conteneur : conteneur de 16 litres à isolation en polyuréthane, fermé hermétiquement
- Position des 3 plaques eutectiques carrées de type 4 :
1 dans le fond, 1 sur le contenant réfrigéré et 1 autre par-dessus.

Remarque : Le contenant réfrigéré peut être placé entre la plaque du fond et la plaque du milieu, ou entre la plaque du milieu et la plaque du dessus. Lorsqu'un seul contenant est placé entre la plaque du fond et la plaque du milieu, les deux plaques eutectiques du dessus se retrouvent l'une sur l'autre, par-dessus le contenant réfrigéré.

- Délai de livraison (temps entre l'heure d'emballage et l'heure de réception) :
≤ 24 heures.
- Cette configuration peut être utilisée pour expédier des CGR en même temps que des protéines plasmatiques.

Protéines plasmatiques réfrigérées (8 litres)

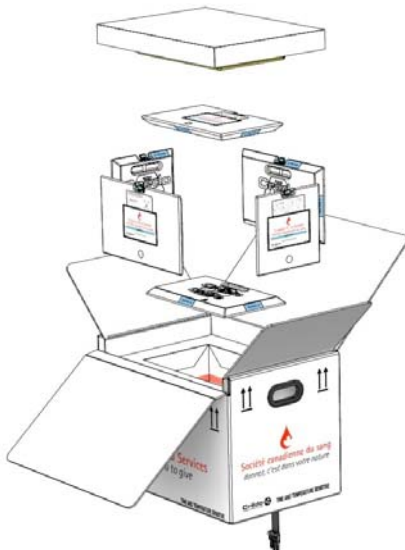

Éléments à vérifier à la réception :

- Conteneur : conteneur de 8 litres à isolation en polyuréthane, fermé hermétiquement
- Position des 6 plaques eutectiques de type 4 :
en cube
- Emplacement des protéines plasmatiques : à l'intérieur du cube
- Délai de livraison (temps entre l'heure d'emballage et l'heure de réception) :
≤ 24 heures
- Cette configuration peut être utilisée pour expédier des CGR en même temps que des protéines plasmatiques.