

Pièce 2 : Retour des conteneurs à la Société canadienne du sang

Après avoir retiré les produits du conteneur, emballez les plaques eutectiques **immédiatement** et fermez le conteneur hermétiquement.

- Pour les configurations en cube, disposez les plaques en forme de cube et placez le matériel d'emballage dans le cube.
- Pour les autres configurations, disposez les plaques à plat dans le fond du conteneur, puis placez du matériel d'emballage (fourni ou autre) au-dessus des plaques afin de protéger le couvercle.

Si vous constatez qu'une plaque fuit, évitez les contacts excessifs avec les yeux et la peau. Bien que le liquide eutectique contenu dans les plaques soit **inoffensif**, il convient de prendre des précautions, en utilisant des gants par exemple, pour éviter une irritation cutanée.

- Retirez la plaque qui fuit du conteneur.
- Nettoyez le conteneur à l'aide d'un matériau absorbant, que vous jetterez ensuite.
- Placez la plaque dans un sac en plastique, puis fermez le sac en faisant un nœud.
- Placez le sac dans un autre sac en plastique, que vous fermerez à l'aide d'un nœud également.
- Placez la plaque se trouvant dans les deux sacs en plastique dans un conteneur destiné à être renvoyé à la Société canadienne du sang. Aucune précaution pour transport de matériaux spéciaux ou dangereux n'est nécessaire.

Les fiches signalétiques des plaques eutectiques sont fournies dans la **pièce jointe n° 3**.